

Nous vous remercions cordialement de votre commande.

Pour que vous ayez totale satisfaction à notre produit nous vous prions de suivre les indications suivantes :



Personal Cooling System (PCS): produit médical de la classe 1 pour améliorer la performance physique des patients atteints de sclérose de plaques.

Remplissage :

1. Enlevez le bouchon blanc du tuyau fin du coolpad.
2. Remplissez de environ 30 ml de eau distillée la seringue livrée ci-joint.
3. Placez la seringue dans le bout vert du tuyau.
4. Remplissez le coolpad doucement avec peu de pression. Le coolpad devient plus foncé. Dès que tout le coolpad est foncé vous pouvez arrêter le remplissage. Observez le remplissage pour éviter que le eau ne provoque des dégâts au coolpad. Vous pouvez ensuite refermer le tuyau avec le bouchon blanc.
5. Dès que le eau est évaporée vous pouvez recommencer le remplissage.

Pour augmenter la longévité du matériel de rafraîchissement et pour éviter des salissure (calcaire) il est préférable d'utiliser de l'eau bouillie ou distillée.

Entretien :

- " Les vêtements rafraîchissants peuvent être lavés à 30°C avec le programme linge délicat.
- " Utiliser un produit de lessive pour linge délicat.
- " **Ne pas utiliser d'assouplissant**
- " Pour le laver placez le vêtement dans un filet de protection..
- " Ne pas repasser. Ne pas sécher dans un sèche-linge.

Attention:

Le matériel de rafraîchissement ne doit pas entrer en contact avec des objets pointus.

Réactions:

Nous nous intéressons en permanence au développement continu.

Vos idées nous sont précieuses. Infos à: info@unico-swiss-tex.ch

UNICO swiss tex GmbH
Chälengasse 4
CH-6053 Alpnachstad



Tel: +41 (0)41 671 00 71
Fax: +41 (0)41 671 00 70
www.unico-swiss-tex.ch
E-mail: info@unico-swiss-tex.ch