

Grazie di cuore per la sua ordinazione.



La preghiamo di voler seguire le seguenti indicazioni:

Personal Cooling System (PCS) quale prodotto medico della classe 1: indumenti rinfrescanti per pazienti affetti da sclerosi a placche per migliorare la prestazione fisica

Riempimento:

1. Elimini il coperchio bianco del tubo sottile nel Coolpad
2. Riempia di ca. 30 ml con acqua distillata lannessa siringa
3. Faccia penetrare la punta della siringa nella parte verde del tubo
4. Riempia ora il Coolpad pian piano e con poca pressione. Il Coolpad si scurisce. Quando il Coolpad è completamente scuro può smettere di riempirlo. Osservi il riempimento per evitare che entri troppa acqua e che il Coolpad si danneggi. Richiudere il tubo con il coperchio bianco.
5. Non appena l'acqua sarà evaporata, potrà riempire di nuovo il Coolpad.

Per aumentare la longevità del materiale di raffreddamento e per evitare sporchie (calcare) è preferibile utilizzare acqua bollita o distillata.

Cura:

- ~ Gli indumenti rinfrescanti possono essere lavati a macchina con un programma delicato a 30°C
- ~ Utilizzare lisciva per il lavaggio delicato
- ~ **Non utilizzare ammorbidente**
- ~ Mettete gli indumenti in un sacco a rete per lavaggio
- ~ Non stirare o mettere nell'asciugatrice

Attenzione:

Il materiale di raffreddamento non deve venire a contatto con oggetti appuntiti.

Osservazioni:

Siamo interessati ad un costante sviluppo del prodotto: qualsiasi sua informazione o osservazione sarà per questo preziosa. Informazioni a: info@unico-swiss-tex.ch

UNICO swiss tex GmbH
Chälengasse 4
CH-6053 Alpnachstad



Tel: +41 (0)41 671 00 71
Fax. +41 (0)41 671 00 70
www.unico-swiss-tex.ch
E-mail: info@unico-swiss-tex.ch